

A handheld diagnostic device with a screen displaying a menu. The screen shows the text 'QuikRead go' at the top left, 'LIS off 2-13 09:47' at the top right, and five menu items: 'Measure', 'Results', 'Profiles', 'Quality control', and 'Settings'. The 'ORION DIAGNOSTICA' logo is visible at the bottom of the screen. The device is shown at an angle, with a dark, textured background on the left.

QuikRead go®

LIS off 2-13 09:47

Measure

Results

Quality control

Profiles

Settings

ORION
DIAGNOSTICA

Přístroj QuikRead go®

Výsledky, kterým můžete věřit

- ✦ Snadné použití
- ✦ Minimum ruční práce
- ✦ Propojitelný

ORION
DIAGNOSTICA

Přístroj QuikRead go®

Společnost Orion Diagnostica uvádí na trh novou generaci POCT přístroje QuikRead go.

Systém QuikRead go je určen hlavně do primární péče, poskytuje lékařům cenné informace pro rozhodování o diagnóze a postupu léčby.

Přístroj QuikRead go je plně automatický kompaktní fotometr, který se používá pro kvantitativní nebo kvalitativní měření spolu se sadami reagensů QuikRead go. Přístroj měří absorpenci (zákal) obsahu kyseliny a převádí hodnotu absorpance na výsledek měření na základě předem nastavené kalibrační křivky. Snadné použití, rychlost a spolehlivost výsledků jsou cenným nástrojem pro každodenní práci zdravotnického personálu. Flexibilita testování znamená vždy efektivní pracovní postup.

Vlastnosti a výhody přístroje QuikRead go®

Snadné použití

- Intuitivní komunikace s uživatelem
- Interaktivní dotyková obrazovka, která vede uživatele měřením pomocí animací

Minimum ruční práce

- Automatické míchání a přidávání činidla do předplněných kyvet
- Výsledky jsou automaticky ukládány do vnitřní paměti přístroje
- Identifikaci uživatele a/nebo pacienta lze propojit s naměřeným výsledkem

Propojitelný

- 3 standardní USB vstupy umožňují použít paměťová média (flash disk), tiskárnu nebo čtečku čárového kódu.
- Připojení k LIS/NIS

QuikRead go®

QuikRead go je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.



Orion Diagnostica Oy, Finland

Zastoupení pro: ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, tel.: +420 233 350 533, fax: +420 233 350 532
e-mail: orion@oriondiagnostica.cz, www.oriondiagnostica.cz, www.quikread.cz

Produkt	Kat. č.
Přístroj QuikRead go	135867
Tiskárna k přístroji QuikRead go	136203
Čtečka čárových kódů k přístroji QuikRead go	136204
Akumulátor přístroje QuikRead go	136205

